



SPORECLEAR™ MEDICAL DEVICE DISINFECTANTS

SporeClear společnosti Hu-Friedy představuje jednoduché řešení povrchové dezinfekce v zubní ordinaci. Jednorázový přípravek čistí a dezinfikuje kritické pracovní plochy během 1 minuty. SporeClear nabízí rychlý, jednoduchý a účinný způsob, jak vytvořit bezpečné pracovní prostředí, v němž budou před nebezpečnými patogeny ochráněni jak zaměstnanci, tak jejich pacienti. Naše nové dezinfekční prostředky jsou ekologické, neobsahují žádné silné chemikálie a jsou vhodné pro všechny omývatelné povrchy. Hu-Friedy vytváří inovativní řešení, pomáhající dentálním profesionálům podávat ty nejlepší výkony.



Rychlé řešení pro účinnou dezinfekci za necelou minutu sporicidní – tuberculocidní – baktericidní – virucidní – fungicidní

- unikátní, patentované složení eliminuje spory, viry, bakterie a plísně (včetně C. Difficile, Hepatitis B/C, H1N1, MRSA, TB a NDM-1) během jedné minuty
- na nealkoholové bázi, bez aldehydů, chloridů, fenolů, peroxidů a nonylfenol-etoxylátů (NPE)
- neabrazivní, nekorodující a nevolatelní, bezpečný pro veškeré povrchy
- dostupný v různých provedeních, čímž je možno vyhovět nejrůznějším potřebám dezinfekce, včetně utěrek, tekutých sprejů a koncentrátů




UTĚRKY • TEKUTÉ SPREJE • KONCENTRÁTY


How the best perform

Hu-Friedy


JAK FUNGUJE SPORECLEAR

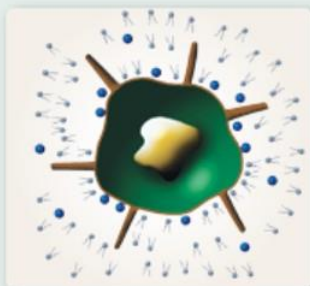

Jedinečná supramolekulární struktura vytváří supermichel na povrchu pokrytém patogeny, což narušuje mikrobiální působení.

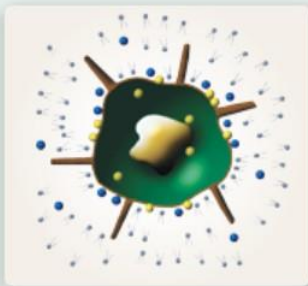

Narušená buněčná membrána urychluje pohyb denaturované molekuly do cytoplazmy.

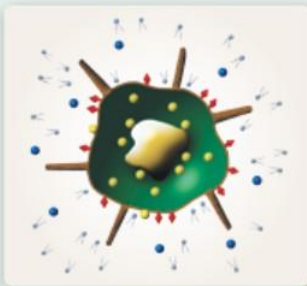

Přerušení buněčných biochemických pochodů vede k fyzickému rozpadu buněčné struktury.



Patogen není jen deaktivovaný – jeho základní struktura je fyzicky zničena.

Kontakt


Narušení

Rozpad

VÝSLEDKY

Zdokonalená dezinfekce likviduje patogeny fyzickým, chemickým a bio-chemickým působením

• odpovídá všem EU požadavkům včetně EN1276; EN1650; EN14348; EN13704; EN14476; EN13727; EN1656; EN13624; EN1657; EN14204

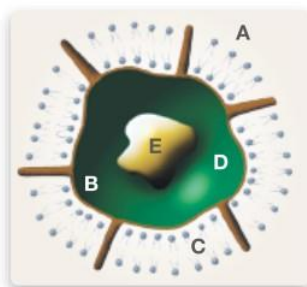

Anatomie živé patogenní buňky

A strukturální proteiny
B cytoplazmická membrána
C lipidní dvojvrstva
D Cytoplazma
E jádro

SPORECLEAR dezinfekční prostředky lékařského zařízení zahrnují:



MSCD354160

Utěrky
(160 ks v dóze)

MSCD354161

Utěrky náhradní náplň
(160ks)



MSCD356750

Tekutý sprej
(750 ml lahev
s rozprašovačem)



MSCW35C01

Koncentrát
1l lahev
(pro 12,5l roztoku)

Hu-Friedy



Altis Group spol. s r.o.

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY ORTHO ORGANIZERS PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO
Žerotínova 901/12, 690 02 Břeclav, tel./fax: 519 325 414, www.altisgroup.cz, email: ortho@altisgroup.cz